

Neuropad

Detección precoz del Síndrome del pie Diabético



neuropad®

Qué es la Celiaquía

La celiacía es una enfermedad Autoinmune causada por una intolerancia permanente al gluten y más concretamente, a su fracción proteica llamada gliadina.

En personas con predisposición genética, la ingestión de esta proteína provoca una lesión grave de la mucosa intestinal, caracterizada histológicamente por una atrofia de las vellosidades intestinales.

- ✓ Test de Monitorización de la Celiaquía
- ✓ Con un simple pinchazo en el dedo
- ✓ Test para realizar in situ en la consulta
- ✓ Resultados en 10 minutos

Indicaciones

Kit diseñado para detectar anticuerpos anti gliadina y anti transglutaminasa tisular (tTG) humanos en sangre total, los principales anticuerpos asociados con el consumo de gluten.

Por qué es importante ésta prueba

La celiacía puede ser grave y si no se trata puede derivar en afecciones como deficiencias de vitaminas y minerales, malnutrición, cáncer del intestino delgado y anemia.

Coeliac Monitor™ se emplea para comprobar la ausencia de gluten accidental en la dieta recomendada a enfermos celíacos y así evitar su trastornos.

T +931 193 089

Info@csnovotest.com

www.csnovotest.com

¿A quién va dirigido?

- ✓ Enfermos celíacos
- ✓ Dietas sin gluten

¿Qué se analiza?

Anticuerpos anti Gliadina IgG y anticuerpos anti transglutaminasa tisular tTg

Principio del test

Los anticuerpos anti- tTg presentes en la sangre de pacientes con la celiacía reaccionan con las partículas de látex conjugadas con la tTg humana recombinante. Estos complejos, formados por partículas coloidales/tTg/Ig anti-tTg, migran a través de un proceso cromatográfico hacia la ventana de reacción. Esta zona contiene tTg humana recombinante, que reacciona con el complejo de partículas coloidales/tTg/Igs anti tTg, generando una línea rasa en el test.

Contenido del test

- 5 Dispositivos para el test
- 5 Lancetas de seguridad, de un solo uso
- 5 Micropipetas
- 1 Diluyente de la muestra (ampolla de 1,5ml)
- Manual de instrucciones

Sensibilidad y Especificidad del test

	Sensibilidad		Especificidad	
	tTg	Gliadina	tTg	Gliadina
General	83%	79%	95%	90%

Conservación del kit

El kit **Coeliac Monitor™** debe conservarse en nevera entre 2-8°C. La fecha de caducidad figura impresa en la caja

Presentación

Caja con material para realizar 5 análisis

T +931 193 089
Info@csnovotest.com
www.csnovotest.com